



Praktisk, lätt och stabil

Rollator

TOPRO TROJA WALKER

Användningsområde

TOPRO Troja Walker är en praktisk lättviktsrollator med underarmsstöd som ger bra stöd för överkroppen. Den är enkel att fälla ihop och tar lite plats vid förvaring. Produkten är avsedd för vuxna och godkänd för användning på plant underlag inomhus. Läs igenom bruksanvisning innan produkten tas i bruk.

Skötsel/Underhåll

Maskintvätt i diskabinett som används på hjälpmedelscentraler kan användas vid rengöring. Använd inte slipmedel, ånga och undvik att spola med tryck direkt mot lager (hjul, framgafflar). Använd aldrig en skadad eller defekt produkt. För detaljerade instruktioner, se rekonditioneringsanvisning för TOPRO Troja Walker.



Utfällning/hopfällning

För utfällning:

Lossa stroppen mellan underarmsstöden. Lossa låshaken på sitsen. Tryck sidsstängerna nedåt och utåt så att sidoramarna glider isär. Tryck sidsstängerna nedåt tills du hör ett "klick". Sätt fast stroppen mellan underarmsstöden.

För hopfällning:

Lossa stroppen mellan underarmsstöden. Dra stroppen på sitsen uppåt och tryck ihop sidoramarna. Tryck låshaken över sidsstängerna.

För mer detaljerade instruktioner, se bruksanvisning.

made in Norway



Modern nordisk design



7 ÅRS GARANTI

Alla våra produkter levereras med 7 års garanti



Troja Walker
Artikelnummer
815430



Troja Walker S
Artikelnummer
815440



Troja Walker XS
Artikelnummer
815450



HÅLLBARHET

Miljövänlig produktion genom hållbart producerade material och ren energi.

Viktigt att veta

Använd alltid parkeringsbromsen på båda sidor, vid stopp eller parkering. Använd inte produkten i trappor och var försiktig när du passerar trösklar eller liknande. Använd inte produkten för transport av personer eller tung last. Gör inga tekniska ändringar av produkten, eftersom det kan riskera din säkerhet och garantin upphävs. Använd parkeringsbromsen på båda sidor innan du sätter dig på sitsen.

För mer detaljerade säkerhetsmeddelanden, se bruksanvisning.



TEKNISK DATA TROJA WALKER

Storlek	M (medium), art.nr 815430	S (Smal), art.nr 815440
Rekommenderad brukarhöjd	150–185 cm	130–170 cm
Max. brukarvikt	135 kg	125 kg
Höjd underarmsstöd	980 – 1150 mm	840 – 1000 mm
Max. längd	650 mm	650 mm
Max. bredd	630 mm	630 mm
Bredd mellan underarmsstöd	450 mm	450 mm
Greppdistans körbroms	74 mm	74 mm
Sitthöjd	630 mm	550 mm
Svängdiameter	840 mm	840 mm
Hjulstorlek	200 mm	200 mm
Diameter handtag	35 mm	35 mm
Mått hopfälld (l x b x h)	650 x 330 x 1020 mm	650 x 330 x 880 mm
Användningsområde	Inomhus	Inomhus
Produktvikt	8,9 kg	8,6 kg
Max. belastning korg	5 kg	5 kg

topromobility.se

kundservice@topromobility.se | +46 08 311 330

TOPRO
– keep on moving